


DOLPINA Bolusversorgung

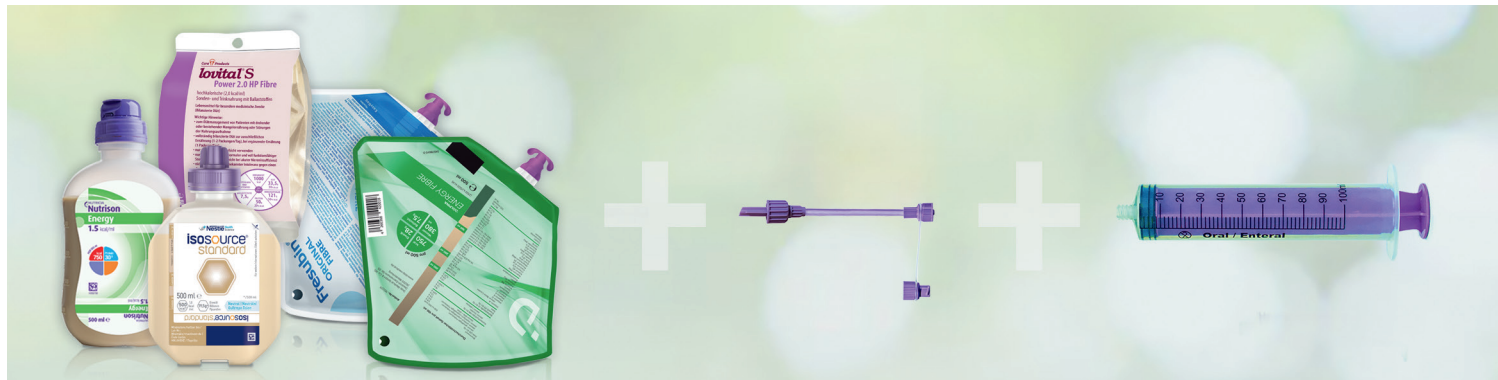

Der Bolus Adapter erleichtert die Bolus-Applikation, indem er eine saubere und sichere Entnahme von Sondennahrung ermöglicht.

Produktmerkmale

DOLPINA® Bolus Adapter ENFit®/ENPlus®

- Zur Erleichterung der Bolus-Applikation
- Zur sauberen und sicheren Entnahme von Sondennahrung aus einem Sondennahrungsbehältnis in eine enterale Spritze ENFit®
- Mit ENPlus®-Anstechdorn: geeignet für alle Sondennahrungsbehältnisse mit ENPlus®-Anschluss (DOLPINA Bag®, Fresenius EasyBag®, Nutricia Milupa SmartPack, Nestlé SmartFlex®, ...)
- Steril

Art.-Nr. (REF.-Nr.)	D15BA	D1BA
PZN	17876239	17876245
GTIN	4260368420223	4260368420230
Hilfsmittelnummer	03.99.99.1036	03.99.99.1036
Artikel	DOLPINA® Bolus Adapter ENFit®/ENPlus®	DOLPINA® Bolus Adapter ENFit®/ENPlus®
VE	15 Stück	1 Stück

Produktmerkmale

DOLPINA® enterale Spritze ENFit®

- Skalierung in kleinen Schritten für eine einfache und exakte Dosierung
- Sichere ENFit®-Schraubverbindung gem. DIN EN ISO 80369-3
- Steril

Art.-Nr. (REF.-Nr.)	D100ML30	D100ML1
PZN	15784645	15784651
GTIN	4260368420162	4260368420179
Hilfsmittelnummer	03.29.01.1003	03.29.01.1003
Artikel	DOLPINA® enterale Spritze ENFit® 100 ml	DOLPINA® enterale Spritze ENFit® 100 ml
VE	30 Stück	1 Stück




Die Bolusgabe mit Bolus Adaptern und 100 ml ENFit® Spritzen ist für den Leistungserbringer kaufmännisch vorteilhaft. In der Regel können die Produkte zur Bolusgabe separat abgerechnet werden. Sie gehören **nicht** in den Versorgungsumfang der Schwerkraft- oder der Pumpenpauschale.

DOLP MEDICAL

Dolp Medical GmbH & Co. KG
Diedrich-Dannemann-Str. 55
26203 Wardenburg

Tel 0441 / 3 61 60 67 - 0
Fax 0441 / 3 61 60 67 - 55
E-Mail info@dolp-medical.de

Applikationsarten

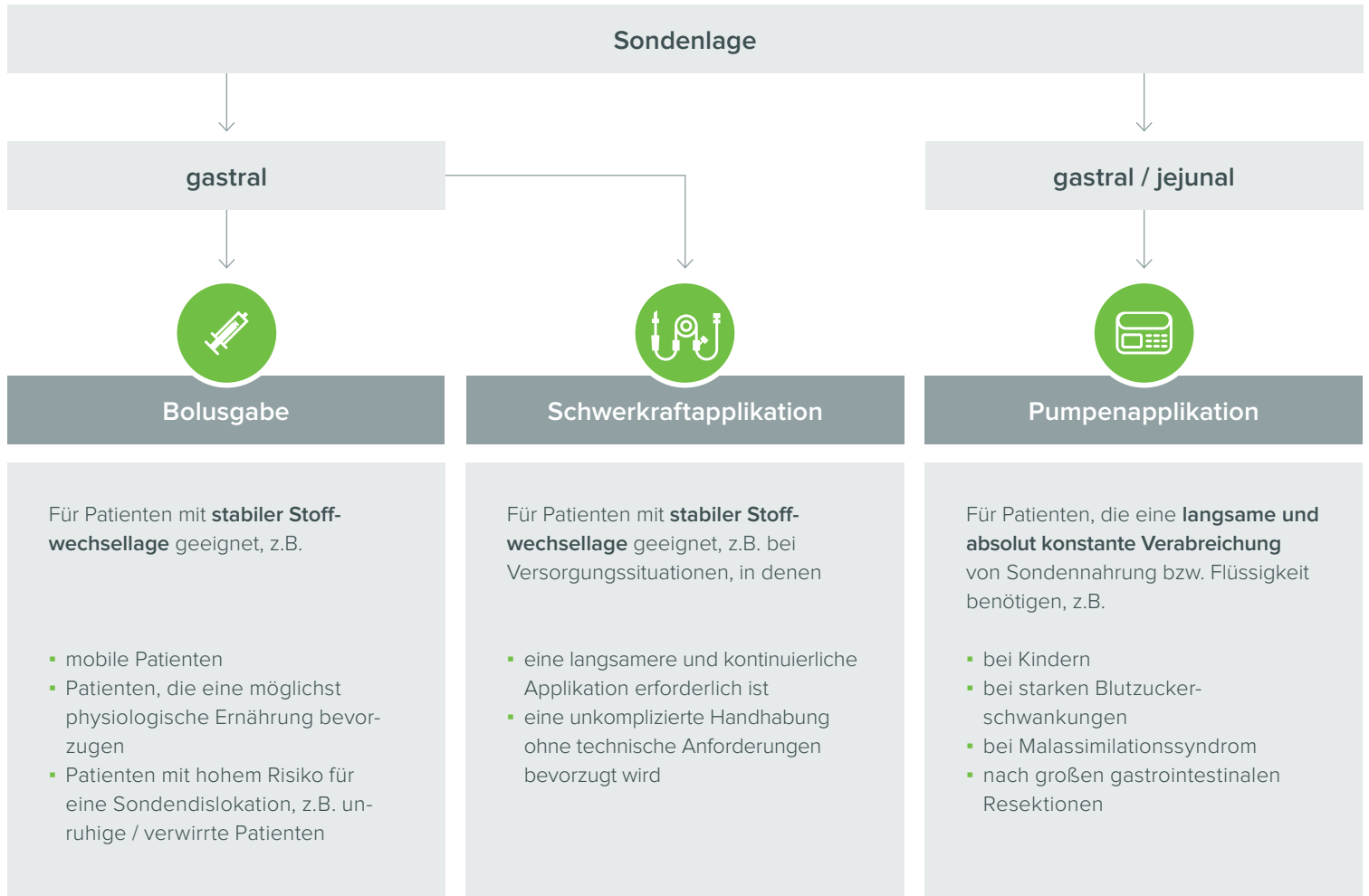

Tipps für eine erfolgreiche Bolusgabe:

- Verabreichen Sie die Nahrung nicht zu schnell, um Unverträglichkeiten zu vermeiden (Richtwert: bis zu 300 ml in 15 Minuten).
- Die Größe eines Nahrungsbolus sollte max. 300 ml betragen. Der Bolus kann alle 3–4 Stunden wiederholt werden.
- Während der Ernährungszeit und mindestens 30–60 Minuten nach Beendigung der Nahrung sollte der Oberkörper hochgelagert werden (30°–45°) oder eine Sitzposition eingenommen werden, um Reflux zu vermeiden.

Unsere Empfehlung zum Materialeinsatz:

- 100ml ENFit® Spritze (1 Stück/Tag)
- Bolus Adapter (1 Stück/Tag)